

Протокол работы с имплантатами RENOVA R-1 при проведении навигационной хирургии с набором RealGuide



Описание

- Мукотом
- Стартовое сверло
- Пилотное сверло 8,5
- Пилотное сверло 10
- Пилотное сверло 11,5
- Пилотное сверло 13
- Пилотное сверло 16

Добавить один СИНИЙ ограничитель на 1,5 мм

3.75x10 3.75x11.5 3.75x13 3.75x14.5 4.5x8.5 4.5x10 4.5x11.5 4.5x13

■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■					■		
	■	■	■			■	■
		■					■
			■				

Протокол для мягкой кости для 3.75

- Сверло для мягкой кости \varnothing 3.75 x 10
- Сверло для мягкой кости \varnothing 3.75 x 11.5
- Сверло для мягкой кости \varnothing 3.75 x 13
- Сверло для мягкой кости \varnothing 3.75 x 14.5

■		■	■				
	■						
		■					
			■				

Протокол для плотной кости для 3.75

- Сверло для плотной кости \varnothing 3.75 x 10
- Сверло для плотной кости \varnothing 3.75 x 11.5
- Сверло для плотной кости \varnothing 3.75 x 13
- Сверло для плотной кости \varnothing 3.75 x 14.5

■							
	■						
		■					
			■				

Протокол для мягкой кости для 4.5

- Сверло для мягкой кости \varnothing 4.50 x 8.5
- Сверло для мягкой кости \varnothing 4.50 x 10
- Сверло для мягкой кости \varnothing 4.50 x 11.5
- Сверло для мягкой кости \varnothing 4.50 x 13

				■			■
					■		
						■	
							■

Протокол для плотной кости для 4.5

- Сверло для плотной кости \varnothing 4.50 x 8.5
- Сверло для плотной кости \varnothing 4.50 x 10
- Сверло для плотной кости \varnothing 4.50 x 11.5
- Сверло для плотной кости \varnothing 4.50 x 13

				■			
					■		
						■	
							■

УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТА

■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---